


使用目的

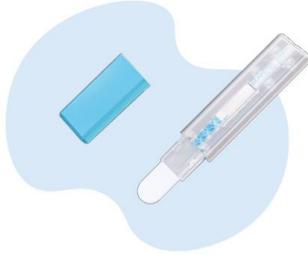

本品は研究用試薬です。この製品で得られた結果の臨床的有用性については確立されていないため、診断（感染しているかどうかの判断）等の目的では使用しないでください。本品はイムノクロマト法による抗原検出試薬です。検体に含まれるSARS-CoV-2のヌcleoカプシド蛋白質抗原の定性検出の判別を行います。この検査の結果は診断等の判断の材料に用いることはできません。本品で反応がある場合は、かかりつけ医又は地域のルールに従い、発熱相談窓口等にご相談ください。なお、本品で反応がなかったとしても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

研究用


検査結果

陽性




C・Tにラインが表示

陰性

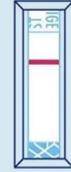

Cにラインが表示され、
Tにラインが表示されない


無効

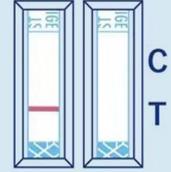

Cにラインが表示されない

研究用

使用説明

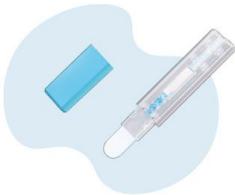

STEP 1

検査スティックの青いキャップを外します。

STEP 2

検査スティックの先端部分を舌上に置き、約2分間くわえ。



約2分

STEP 3

約10分ほど待ち、結果を判定します。



約10分

研究用

※正確な結果を得るために、飲食・歯磨き・うがい直後を避け30分以上経過してから検査してください。

注意事項

- 本品は研究用としての使用に限定されます。
- 本品は使用の直前までパウチから開封しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品を使用しないでください。
- パウチが破損していたり、開いていたりは使用しないでください。
- 検査スティックは使い捨てです。
- 各テストを実行する際、検体を取り扱う際は適切な防護用具や手袋を使用するなどバイオハザード対策を講じてください。
- 検体の採取と処理は手順に従う必要があります。使用説明書通りの手順を行わないと結果が不正確になる可能性があります。
- 正確な結果を得るためには目視できるほどの血の混じった検体や過度に粘性のある検体を使用しないでください。
- SARS-CoV-2の検体を扱う際は常に実験室にて適切な安全手順に従う必要があります。使用された検査スティックは感染源となる可能性があります。地域の規制要件に従い、適切に取り扱い、廃棄をお願いいたします。
- 規定以外の温度での保管は結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

研究用